
ESPE™ Sil

Silan

Opis produktu

Optymalną adhezję pomiędzy metalem i kompozytem, porcelaną i kompozytem oraz pomiędzy powierzchniami kompozytowymi można uzyskać poprzez połączenie chemiczne. Takie połączenie można wytworzyć stosując piaskowanie Rocatec™ Plus/ Soft lub Cojet™ Sand, a następnie silanizację wypiąskowanej powierzchni silanem ESPE™ Sil.

Rocatec Plus/ Soft i ESPE Sil są częścią systemu Rocatec™; Cojet Sand i ESPE Sil są składnikami systemu Cojet™. Wszystkie wymienione materiały i urządzenia produkowane są przez 3M ESPE.

F Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych w niniejszej instrukcji materiałów i urządzeń zawarte są w odpowiednich instrukcjach. Instrukcję użycia przechowywać przez cały czas stosowania produktu.

Wskazania

- Silanizacja przed licowaniem wypiąskowanego szkieletu metalowego
- Silanizacja przed osadzeniem wypiąskowanych prac ceramicznych, kompozytowych lub metalowych
- Silanizacja wypiąskowanych uszkodzeń uzupełnień pełnoceramicznych i wypełnień kompozytowych oraz uszkodzeń licówek porcelanowych lub kompozytowych przy odsłoniętym i nie odsłoniętym metalu

Przygotowanie

4☐ W przypadku aplikacji wewnątrzustnej założyć koferdam.

4☐ Silanizowaną powierzchnię wypiąskować, stosując Rocatec Plus/Soft lub Cojet Sand.

Postępowanie

4☐ Do każdej aplikacji stosować świeżą porcję ESPE Sil. Materiał odmierzać na czystą, wolną od tłuszczu tackę.

- Butelkę z lotnym roztworem zamykać natychmiast po pobraniu płynu.

4☐ Zwilżyć pędzelek w ESPE Sil.

- Do aplikacji stosować specjalny pędzelek, przeznaczony wyłącznie do nakładania silanu.

4☐ Powierzchnie wypiąskowane Rocatec Plus/Soft lub Cojet Sand pokryć jedną warstwą silanu.

4☐ Odczekać **30 sek. (przy stosowaniu wewnątrzustnym)** lub **5 min. (przy stosowaniu poza jamą ustną)** do momentu wyschnięcia lotnego roztworu.

- Aby odparować wszystkie lotne składniki materiału i uzyskać połączenie wolne od wad, ściśle przestrzegać wymienionych czasów!
- Przed aplikacją opakera, Visio™ Bond, prod. przez 3M ESPE oraz kompozytu, silanizowane powierzchnie muszą być całkowicie suche.
- Unikać zanieczyszczenia silanizowanych powierzchni.

4☐ Natychmiast po osuszeniu postępować zgodnie z odpowiednią procedurą, zależną od rodzaju uzupełnienia. Postępować zgodnie z instrukcją użycia stosowanych produktów:

- Licowanie szkieletu metalowego: nałożyć Sinfony™ Opaquer, prod. przez 3M ESPE.
- Osadzanie adhezyjne: postępować zgodnie z instrukcją użycia cementu adhezyjnego.
- Wewnątrzustna naprawa uzupełnień ceramicznych i kompozytowych, gdy metal jest odsłonięty: odsłonięte powierzchnie metalu pokryć Sinfony Opaquer. Materiał utwardzić światłem lampy halogenowej. Porcelanę lub kompozyt pokryć materiałem Visio Bond. System łączący utwardzić światłem.
- Wewnątrzustna naprawa uzupełnień ceramicznych i kompozytowych, gdy metal nie jest odsłonięty: pokryć porcelanę lub kompozyt materiałem Visio Bond i utwardzić światłem.

4☐ Naprawić uzupełnienie kompozytem, postępując zgodnie z instrukcją użycia wybranego materiału.

Przeciwwskazania

U osób wrażliwych nie można wykluczyć wystąpienia reakcji uczuleniowej. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej zaprzestać stosowania i całkowicie usunąć produkt.

Przechowywanie i trwałość

Produkt przechowywać w temperaturze 15-25°C.
Nie stosować po upływie daty przydatności do użycia.

Informacje dla klienta

Nikt nie jest upoważniony do udzielania informacji niezgodnych z informacjami zawartymi w tej instrukcji.

Gwarancja

3M ESPE gwarantuje, że ww. produkt pozbawiony jest wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. 3M ESPE NIE UDZIELA ŻADNYCH DODATKOWYCH GWARANCJI, W TYM ŻADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY, LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. Każdy użytkownik ww. produktu powinien sam określić jego przydatność w konkretnym przypadku. 3M ESPE zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktów, które po udowodnieniu okażą się wadliwe w okresie gwarancyjnym.

Ograniczenie odpowiedzialności

O ile nie jest to zabronione przez prawo, 3M ESPE nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty pośrednie, bezpośrednie, zamierzone lub przypadkowe, wynikające z użycia lub nieumiejętności użycia powyższego produktu, bez względu na podaną przyczynę, gwarancję, umowę, zaniedbanie lub odpowiedzialność.

Dystrybutor w Polsce:

3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 60 00, fax (22) 739 60 01

Informacja z 01/04