

Ketac™ Cem Maxicap™, Szkło- jonomerowy cement do osadzania

Opis Produktu

Ketac™ Cem Maxicap™, prod. przez 3M ESPE, jest cementem szkło-jonomerowym do osadzania o jasnoróżowym zabarwieniu, konfekcjonowanym w kapsułkach. Ilość materiału, jaką można uzyskać z jednej kapsułki wynosi co najmniej 0,36 ml.

Szczegółowe informacje dotyczące Alkaliner™, CapMix™, RotoMix™ i systemu Maxicap™, produkowanych przez lub dla 3M ESPE zawarte są w odpowiednich instrukcjach użycia.

F Instrukcję użycia przechowywać przez cały czas stosowania produktu.

Wskazania

Cementowanie wkładów, nakładów, koron i mostów

Cementowanie pierścieni ortodontycznych

Podkłady

Przygotowanie

Aby uzyskać optymalne połączenie, dokładnie oczyścić szkliwo, zębiny oraz powierzchnie metalowe. Osuszyć ubytek 2-3 krótkimi dmuchnięciami powietrza z dmuchawki, wolnego od wody i oleju lub wytamponować wacikami. Nie przesuszyć! **Po osuszeniu, powierzchnia filaru powinna być matowo błyszcząca.** Nadmierne osuszenie strumieniem powietrza może zmniejszyć adhezję lub spowodować powstanie zjawiska nadwrażliwości pozabiegowej po osadzeniu uzupełnienia.

Powierzchnie metalu dokładnie osuszyć strumieniem powietrza.

Unikać ponownego zanieczyszczenia śliną.

Ochrona miazgi

Nie stosować szkło-jonomeru bezpośrednio na zębiny w pobliżu miazgi, np. przy osadzaniu wkładów lub obnażoną miazgę. Przed pobraniem wycisku pokryć zębiny w pobliżu miazgi twardniejącym materiałem na bazie wodorotlenku wapnia, np. Alkaliner.

Aktywacja, mieszanie, aplikacja

Kapsułkę zaktywować w zgniataczu Maxicap przez 2 sekundy. Materiał w kapsułce zmieszać w mieszalniku o wysokiej częstotliwości (ok. 4300 obrotów na minutę), np. CapMix, lub mieszalniku rotacyjnym RotoMix. Aplikować stosując aplikator Maxicap. Zgniatacz i aplikator Maxicap oznaczone są niebieskim kolorem.

W czasie aplikacji i wiązania chronić pole pracy przed dostępem wody i śliny. Nanieść cienką warstwę cementu na wewnętrzne ściany korony i kikut. Następnie osadzić uzupełnienie. Unikać nadmiernego wypełniania korony.

Uwaga

Unikać przerw pomiędzy aktywacją, mieszaniem i aplikacją, gdyż rozpoczęte twardnienie materiału w kapsułce utrudni lub uniemożliwi jego aplikację.

Nadmierne ciśnienie hydrostatyczne w szczelnie przylegających koronach może doprowadzić do podrażnienia miazgi!

Czasy stosowania

Podane poniżej czasy dotyczą temperatury pokojowej 23°C.

	min:sek
Aktywacja	0:02
Mieszanie w RotoMix	0:08
Mieszanie w mieszalniku o wysokiej częstotliwości, np. CapMix	0:10
Czas pracy (od początku mieszania)	3:00
Czas wiązania od początku mieszania	7:00

W temperaturze pomieszczenia przekraczającej 23°C materiał wiąże szybciej. Przekroczenie czasu pracy prowadzi do utraty adhezji do szkliwa i zębiny.

Krótsze mieszanie wydłuża, dłuższe skraca czas pracy i wiązania materiału. W przypadku mieszalników o wysokiej częstotliwości czas mieszania można wybrać w przedziale 8–15 sekund, a w przypadku RotoMix w przedziale 7-12 sekund.

Usuwanie nadmiarów

Nadmiary usuwać nakładaczem i/lub zgłębnikiem po upływie 7 minut od momentu rozpoczęcia mieszania.

Wrażliwość na produkt

U osób wrażliwych nie można wykluczyć uczulenia na produkt. W razie wystąpienia reakcji alergicznych, przerwać jego stosowanie. W nielicznych przypadkach, szczególnie, gdy nie są przestrzegane zalecane zasady postępowania, może wystąpić podrażnienie miazgi.

Przechowywanie i trwałość

Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie stosować po upływie terminu przydatności.

Informacje dla klienta

Nikt nie jest upoważniony do udzielania informacji niezgodnych z informacjami zawartymi w tej instrukcji.

Gwarancja

3M ESPE gwarantuje, że ww. produkt pozbawiony jest wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. 3M ESPE NIE UDZIELA ŻADNYCH DODATKOWYCH GWARANCJI, W TYM ŻADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY, LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. Każdy użytkownik ww. produktu powinien sam określić jego przydatność w konkretnym przypadku. 3M ESPE zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktów, które po udowodnieniu okażą się wadliwe w okresie gwarancyjnym.

Ograniczenie odpowiedzialności

O ile nie jest to zabronione przez prawo, 3M ESPE nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty pośrednie, bezpośrednie, zamierzone lub przypadkowe, wynikające z użycia lub nieumiejętności użycia powyższego produktu, bez względu na podaną przyczynę, gwarancję, umowę, zaniedbanie lub odpowiedzialność.

Dystrybutor w Polsce:

3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 60 00, fax (22) 739 60 01

Informacja z 10/03